

«Алмадез-Эндо»

«Алмадез-Эндо» – многокомпонентное дезинфицирующее средство с синергизмом действующих веществ, не требующее ротации.

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза *Mycobacterium terrae*, бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков и других возбудителей внутрибольничных инфекций), возбудителей туберкулеза, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов (тестировано на тест-штамме *Aspergillus niger*), обладает **овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц, возбудителей анаэробных инфекций легионеллеза и особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), включая споры сибирской язвы.**

Широкая область применения: используется для обеззараживания всех объектов внутрибольничной среды и объектов во всех отраслях народного хозяйства.

Предназначено:

А. Для дезинфекции и очистки объектов внутрибольничной среды во всех подразделениях МО и ЛПО любого профиля, включая роддома, отделения неонатологии, эндоскопии, ЭКО и др. при проведении профилактической и очаговой дезинфекции:

- всех видов поверхностей помещений, мебели и оборудования (в т.ч. куветы новорожденных, аппараты ИВЛ, ИК, наркозно-дыхательные и др.) при проведении текущих и генеральных уборок, текущей и заключительной очаговой дезинфекции;
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой медицинских инструментов, включая стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы;
- дезинфекции высокого уровня и стерилизации медицинских изделий жестких и гибких эндоскопов;
- стерилизации медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним;
- для обеззараживания медицинских отходов классов А, Б, В, включая жидкие биологические выделения, воздуха.

Б. Для профилактической и очаговой дезинфекции и очистки на объектах всех отраслей народного хозяйства, включая учреждения - детские дошкольные, образовательные, быти-индустрии, аквапарки, бассейны, сауны, объекты ГО, Вооруженных сил, МЧС, в т.ч. все виды транспорта (общественный, воздушный, водный, железнодорожный, санитарный, транспорт для перевозки пищевых продуктов и др.).

Состав:

Перекись водорода - 22%

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дицилдиметиламмоний хлорид (суммарно) - 3,0%

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 3,0%

Преимущества:

- Обладает высокими моющими свойствами, нейтрализует запахи;
- Безопасно- относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты;
- Не требует смывания с поверхностей после обработки;
- Не портит обрабатываемые объекты и инструменты.

Срок годности средства: 5,5 лет; рабочего раствора: 35 суток.

Характеристики:

Фасовка:

Флакон 1л

Канистра 5л

Контроль концентрации в рабочих растворах - тест-полоски 100 шт/уп.

Хранение: при температуре не выше +30°C.

Транспортировка: не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после заморозания и размораживания.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Объект обработки	Микробиологические режимы	Концентрация %	Время экспозиции	Кол-во рабочего раствора (л)
Дезинфекция поверхностей помещений, жесткой мебели, оборудования	Бактериальных инфекций (без туберкулеза)	0,1	45 мин	1000
		0,15	30 мин	666
		0,8	10 мин	125
		1,5	5 мин	
	Вирусных инфекций	0,3	60 мин	333
		0,4	30 мин	250
		0,5	15 мин	200
	Кандидозы	0,5	90 мин	200
		1,0	60 мин	100
		2,0	30 мин	50
	Дерматофитии	0,5	120 мин	200
		1,0	90 мин	100
		2,0	60 мин	50
		3,0	30 мин	33
	Туберкулез (M. Terraе)	4.0	90 мин	25
		5.0	60 мин	20
		6.0	30 мин	16.6
		8.0	15 мин	12.5
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой медицинских изделий, включая стоматологические, жесткие и гибкие эндоскопы	Анаэробные инфекции	4.0	120 мин	25
		6.0	60 мин	16.6
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)	0,1	120 мин	1000
		0,2	60 мин	500
		0,5	30 мин	200
	Сибирская язва	5.0	120 мин	20
		6.0	60 мин	16.6
	При инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) вирусной и грибковой этиологии	0,5	90 мин	200
		2,0	60 мин	50
		3,0	15 мин	33
	при инфекциях бактериальной включая туберкулез M. Terraе), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии	5,0	60 мин	20
		6,0	30 мин	16.6
		8,0	15 мин	12.5
Дезинфекция высокого уровня жестких и гибких эндоскопов	При особо опасных инфекциях: чума, холера, туляремия	0,3	60 мин	333
		0,5	30 мин	200
		1,0	15 мин	100
	При анаэробных инфекциях, сибирской язве	4.0	120 мин	25
		6.0	60 мин	15
		7,0	30 мин	14
	-	15	5 мин	6.6
Стерилизация медицинских изделий, включая стоматологические, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним	-	15	60 мин	6.6
		18	30 мин	5.5

АЛМАДЕЗ ЭНДО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА
1. РЕЖИМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;	0,1% - 45 мин	1	999	Протирание 100 мл/м ² Орошение 300 мл/м ²	1000
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,1% - 45 мин	1	999	Протирание, погружение	1000
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	0,4% - 45 мин	4	996	Протирание, погружение	250
Белье, не загрязненное выделениями	0,1%-45 мин	1	999	Погружение	1000
Белье, загрязненное выделениями	0,4% - 45 мин	4	996	Погружение	250
Посуда без остатков пищи	0,1% -30 мин	1	999	Погружение	1000
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	0,4% -45 мин	4	996	Погружение	250
Уборочный материал, инвентарь	0,4%-45 мин	4	996	Протирание, погружение	250
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	0,4%-45 мин	4	996	Протирание, погружение	250
Санитарно-техническое оборудование	0,1%-45 мин	1	999	Протирание	1000

2. РЕЖИМ ТУБЕРКУЛЕЗА (ШТАММ ТЕРРА)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов без видимых загрязнений	4% - 90 мин	40	960	Протирание / 100 мл/м ² Орошение 300 мл/м ²	25
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	4% - 90 мин	40	960	Протирание, погружение	25
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	6% - 60 мин	60	940	Протирание или погружение	16.6
Предметы ухода за больными	6% - 60 мин	60	940	Протирание/погружение	16.6
Белье, не загрязненное выделениями	5% - 60 мин	50	950	Замачивание	20
Белье, загрязненное выделениями	6% - 90 мин	60	940	Замачивание	16.6
Посуда без остатков пищи	5% - 60 мин	50	950	Погружение	20

Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	6% -60 мин	60	940	Погружение	16.6
Уборочный материал, инвентарь	6% - 90 мин	60	940	Протирание, погружение	16.6
Санитарно-техническое оборудование	4% - 90 мин	40	960	Протирание	25

3. РЕЖИМ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛИОВИРУС, ГЕПАТИТЫ (А, Б, С))

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средств а, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки/расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,15% - 60 мин	1,5	998,5	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	66.6
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,15% - 60 мин	1,5	998,5	Протирание, погружение	666.6
Предметы ухода за больными	1% - 60 мин	10	990	Протирание, погружение	100
Белье, не загрязненное выделениями	0,3% - 60 мин	3	997	Замачивание	333.3
Белье, загрязненное выделениями	0,3% - 90 мин	3	997	Замачивание	333.3
Посуда без остатков пищи	0,25% -90 мин	2,5	997,5	Погружение	400
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная и аптечная, предметы для мытья посуды	0,3% - 60 мин	3	997	Погружение	333.3
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	1,0% - 60 мин	10	990	Протирание, орошение, погружение	100
Уборочный материал, инвентарь	1% - 60 мин	10	990	Протирание, погружение	100
Санитарно-техническое оборудование	0,25% - 90 мин	4	996	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	400

4. РЕЖИМ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (КАНДИДОЗЫ, ДЕРМАТОФИТИИ)

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, вт.ч. из дерева), приборы, оборудование; профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;	0,5% - 90 мин -кандидозы	5	995	Протирание / 100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	200
	0,5%-120 мин дерматофитии	5	995		200

Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования	0,5% - 90 мин -кандидозы	5	995	Протирание, погружение	200
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)	1% - 90 мин кандидозы 1% - 120 мин дерматофитии	10	990	Протирание, погружение	100 100
Игрушки, спортивный инвентарь (из пластмассы, резины, металла), средства личной гигиены	1% - 90 мин - кандидозы	10	990	Протирание, погружение	100
	1% - 120 мин-дерматофитии	10	990		100
Белье, не загрязненное выделениями	0,5%-90 мин-кандидозы	5	995	Замачивание	200
	3%-60 мин дерматофитии	30	970		33.3
Белье, загрязненное выделениями	0,5%-90 мин кандидозы	5	995	Замачивание	200
	3% - 60 мин дерматофитии	30	970		33.3
Посуда без остатков пищи	0,5% -90 мин кандидозы	5	995	Погружение	200
Посуда с остатками пищи,	1% - 90 мин - кандидозы	10	990	Погружение	100
Посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды	1% - 90 мин - кандидозы	10	990	Погружение	100
	3% - 60 мин - дерматофитии	30	970	Погружение	33.3
Уборочный материал, инвентарь	1% - 60 мин - кандидозы	10	990	Протирание, погружение	100
	1% - 120 мин дерматофитии	10	990		100
Санитарно-техническое оборудование	0,5%-90 мин-кандидозы	5	995	Протирание	200
	0,5% - 120-дерматофитии	5	995		200
Обувь из кожи, резины, ткани, дермантина и др. синтетических материалов , резиновые, пропиленовые коврики, деревянные решетки	1%-120 мин дерматофитии	10	990	Протирание, погружение	100

5. РЕЖИМ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ЧУМА, ХОЛЕРА, ТУЛЯЕМИЯ), СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ, АНАЭРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Объект дезинфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), приборы, оборудование профилактическая дезинфекция санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов	0,1%-120 мин (чума, холера, туляремия)	1	999	Протирание /100 мл/м ² орошение 300 мл/м ²	1000
	5%-120 мин - сибирская язва,	50	950		20
	4% - 120 мин анаэробы	40	960		25
Предметы ухода за больными, игрушки	0,3%-120 мин (чума, холера, туляремия)	3	997	Протирание, погружение	333.3

	5%-120 мин - сибирская язва,	50	950		20
	4% - 120 мин анаэробы	40	960		25
Белье, не загрязненное выделениями	0,2%-60 мин (чума, холера, туляремия)	2	998	Замачивание	500
	5%-120 мин - сибирская язва,	50	950		20
	4% - 120 мин анаэробы	40	960		25
Белье, загрязненное выделениями	0,5%-120 мин (чума, холера, туляремия)	5	995		200
	6%-120 мин - сибирская язва	60	940		16.6
	6% - 120 мин анаэробы	60	940		16.6
Посуда без остатков пищи	0,2%-60 мин (чума, холера, туляремия)	2	998	Погружение	500
	5%-120 мин - сибирская язва,	50	950		20
	4% - 120 мин анаэробы	40	960		25
Посуда с остатками пищи, предметы для мытья посуды, посуда лабораторная и аптечная	0,3%-120 мин (чума, холера, туляремия)	3	997	Погружение	333.3
	6%-120 мин - сибирская язва	60	940		16,6
	6% - 120 мин анаэробы	60	940		16.6
Уборочный материал, инвентарь	0,3%-120 мин (чума, холера, туляремия)	3	997	Протирание, погружение	333.3
	5%-120 мин - сибирская язва	50	950		20
	4% - 120 мин анаэробы	40	960		25
Санитарно-техническое оборудование	0,3%-120 мин (чума, холера, туляремия)	3	997	Протирание	333.3
	5%-120 мин - сибирская язва,	50	950		20
	4% - 60 мин анаэробы	40	960		25
Жидкие выделения (рвотные массы, фекалии, моча, кровь, сыворотка, промывные воды и др. биологические жидкости).	2%-120 мин (чума, холера, туляремия)	20	980	Заливание 3 объемов раствора средства на 1 объем выделений	50
	7%-120 мин - сибирская язва, анаэробы	70	930		14.2
	6% - 120 мин анаэробы	60	940		16.6

6. РЕЖИМ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б, В

Вид отходов	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки /расход	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одноразовая медицинская одежда, использованные маски, бахилы	1%-60 мин вирусы, бактерии (класс Б)	10	990	Погружение и замачивание	100
	1%-60 мин кандидозы (класс Б)	10	990		100
	5%-120 мин дерматофитии (класс Б)	50	950		20
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	5%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	50	950		20
	6% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	60	940		16,6
Медицинские изделия однократного применения	1%-60 мин вирусы, бактерии (класс Б)	10	990	Погружение и замачивание	100
	1%-60 мин кандидозы (класс Б)	10	990		100
	5%-120 мин дерматофитии(класс Б)	50	950		20
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	5%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	120	880		20
	6% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	60	940		16,6
Контейнеры для сбора инфицированных медицинских отходов класса Б и В	4%-120мин вирусы, бактерии (класс Б)	40	960	Протирание, орошение	25
	3%-30 мин кандидозы (класс Б)	30	970		33
	3%-120 мин дерматофитии (класс Б)	30	970		33
	1% - 120 мин ООИ (класс В)	10	990		100
	12%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	120	880		8,3
	6% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	60	960		16,6
Остатки пищи	4%-120мин вирусы, бактерии (класс Б)	40	960	Смешивание с рабочим раствором в соотношении 1:1	25
	3%-30 мин кандидозы (класс Б)	30	970		33
	3%-120 мин дерматофитии (класс Б)	30	970		33
	2% - 120 мин ООИ (класс В)	20	990		50
	12%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	120	880		8,3
	6% -120 мин анаэробы (класс Б) сибирская язва (класс В)	60	960		16,6
Биологические	4%-120мин вирусы,	20	980	Заливание 2-х	25

отходы (смывные воды), выделения (кровь, сыворотка, мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и т. п.)	бактерии (класс Б)			объемов раствора на 1 объем выделений, перемешивание	
	3%-30 мин кандидозы (класс Б)	20	980		33,3
	3%-120 мин дерматофитии (класс Б)	20	980		33,3
	2% - 120 мин ООИ (класс В)	20	990	Заливание 3-х объемов раствора на 1 объем выделений, перемешивание	50
	12%-120 мин туберкулез (Терра) (класс В)	30	970		8,3
	6% -120 мин анаэробы (класс Б)	60	940		16,6
	7% - 120 мин сибирская язва (класс В)	70	930		14,2

7. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЭНДОСКОПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ, РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Температура рабочего раствора не менее 18 С°

Вид ИМН	Вид инфекции	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Изделия простой конфигурации из металлов и стекла	Бактериальные (кроме туберкулеза, вирусные, кандидозы)	0,5% - 90 мин* 1% - 30 мин**	5 10	995 990	Погружение	200 100
	Бактериальные (включая туберкулез, вирусные, кандидозы, дерматофитии)	5% - 60 мин* 5% - 30 мин**	50 50	950 950		20 20
	Особо опасные (чума, холера, туляремия)	0,3%-120 мин*	3	997		333.3
	Сибирская язва	5% - 120 мин*	50	950		20
	анаэробные инфекции	4% - 120 мин*	40	960		25
Изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, зеркала с амальгамой, инструменты к эндоскопам, стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы)	Бактериальные (кроме туберкулеза, вирусные, кандидозы)	0,5% - 90 мин* 0,5% - 30 мин**	5	995	Погружение	200 200
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, кандидозы, дерматофитии	5% - 60 мин* 5% - 30 мин**	50	950		20 20
	Особо опасные (чума, холера, туляремия)	0,3%-120 мин*	3	950		333.3
	Сибирская язва	5% - 120 мин*	50	980		20
	Анаэробная инфекция	4% - 120 мин*	40			25

Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним	Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, кандидозы	1% - 60 мин* 1% - 30 мин**	10	990	Погружение	100
	Бактериальные (включая туберкулез), вирусные, кандидозы, дерматофитии	5% - 60 мин* 5% - 30 мин**	50	950		20

*Режим обработки ручным способом

** Режим обработки механизированным способом

8. РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ ЭНДСКОПОВ РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Температура рабочего раствора не менее 18 С°

Вид обрабатываемых изделий	Концентрация, %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Жесткие и гибкие эндоскопы	15% - 5 мин*	150	850	Погружение	6.6
	10% - 5 мин **	100	900		10

*Режим обработки ручным способом

** Режим обработки механизированным способом

9. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЖЕСТКИЕ И ГИБКИЕ ЭНДСКОПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ

Температура рабочего раствора не менее 18 С°

Вид обрабатываемых изделий	Концентрация %/ экспозиция мин	Кол-во средства, мл	Кол-во воды, мл	Способ обработки	Кол-во рабочего раствора (л) из 1 л концентрата
Изделия простой конфигурации из металлов и стекла, изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, зеркала с амальгамой, инструменты к эндоскопам, стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.	15% - 60 мин	150	850	Погружение	6,6